



schweriner naturheil®

Gebrauchsinformation

Stand: VR 1.8 / Juni 2025

Seite 1 von 3

Moor-Wärmeträger

Medizinprodukt

Moor-Wärmeträger

Gr. 1 (30 x 40 cm), Gr. 2/3 (56 x 33 cm) (Doppelkammer/durchgehend)

Füllmaterial: 100 % Naturmoor

Garantie: 6 Monate ab Rechnungsdatum

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Moor-Wärmeträger entschieden haben!

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1. Die Wärmeträger sind für eine Anwendungsdauer von 3 bis max. 6 Monaten konzipiert. Es kann Ihnen sanfte Heilung und Entspannung bieten, aufgrund der natürlichen Inhaltsstoffe. Das heilende Moor wird aus regenerativem Abbau aus einem Heilmoorgebiet gewonnen.

Bio
logisch!

Gesundheit – Ökologie – Ökonomie

- Eine wirklich umweltfreundliche Alternative, da die Folie besonders schonend hergestellt wird.
- sehr gut modellierbar – durch die gute Dehnbarkeit der Folie

Anwendung:

Zur Erwärmung von Heilmoor- und Schlick-Packungen der Größe 30 x 40 cm sowie von Heilmoor-Packungen der Größe 34 x 56 cm und 40 x 60 cm. Der Wärmeträger ermöglicht auf einfache Art die Erwärmung derselben.

Anwendungsgebiete:

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| • Rückenschmerzen | • Zerrungen | • Verrenkungen |
| • Arthrose | • Nackensteife | • Ischias |
| • Gallen- und Leberschmerzen | • Magen- und Darmbeschwerden | • Gynäkologische Beschwerden |



Erwärmungsempfehlung: nur im Wasserbad



PharmaFit GmbH • Moorweg 1 • 19073 Stralendorf • Tel.: +49 (0)3869 7471
www.schweriner-naturheil.de • info@schweriner-naturheil.de





schweriner naturheil®

Gebrauchsinformation

Stand: VR 1.8 / Juni 2025

Seite 3 von 3

Moor-Wärmeträger

Medizinprodukt

Durch spitze und scharfe Gegenstände oder Überhitzung können Schäden an dem Moorkissen entstehen. Es darf dann nicht mehr angewendet werden! Bitte überprüfen Sie das Kissen vor jeder Anwendung und nach dem Erwärmen auf Schäden. Sollte das Kissen undicht sein, bitte nicht mehr verwenden, da andere Gegenstände verschmutzt werden.

Für etwaige Folgeschäden kann keine Garantie übernommen werden.

Zweckbestimmung

Naturmoor-Wärmeträger sind nicht-invasive Medizinprodukte der Risikoklasse I gemäß Regel 1 Anhang VIII der MDR (2017/745). Diese Produkte werden zur äußerlichen Anwendung genutzt und dienen der thermischen Behandlung zur Unterstützung von Muskelfunktionen. Die enthaltenen natürlichen Inhaltsstoffe Moor und Schlick sorgen für eine langanhaltende und gleichmäßige Wärmeabgabe, zur Anwendung bei Linderung von Schmerzen und zur Unterstützung der Muskelentspannung durch diese gezielte Wärmeanwendung.

Die Produkte werden als physikalische Therapiehilfen zur Wärme- und Kälteanwendung, zur Linderung von Muskelverspannungen, zur Unterstützung sowie zur Förderung der Durchblutung eingesetzt.

Was müssen Sie vor der Anwendung beachten?

Prüfen Sie, ob eine Überempfindlichkeit oder allergische Reaktion gegen phthalatfreies PVC vorliegt.

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt. Sollten Nebenwirkungen auftreten, empfehlen wir einen Arzt oder Apotheker zu kontaktieren.

Warnhinweise

Wichtige Warnhinweise zu bestimmten Inhaltsstoffen der Wärmeträger sind ebenfalls nicht bekannt. Nach dem Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

Hinweis auf Anbruch

Nach Anbruch des Artikels nicht über + 25 Grad lagern, schützen Sie die Packung vor Hitze und Licht, da das Material bei Nichtbeachtung brüchig wird.

Hinweise für Entsorgung:

Für Privatpersonen / Für Privathaushalte:

Kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Für Kliniken / Krankenhäuser / Physiotherapeutische Praxen:

Abfallentsorgung ohne besondere Anforderung (nicht-infektiöser Klinikmüll)

Zeichenerklärung:



Chargen-
bezeichnung




Medizin-
produkt



Vor Anwendung
Gebrauchsinformation
lesen



Verwendbar
bis

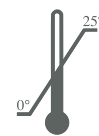

Lager-
bedingungen



PharmaFit GmbH • Moorweg 1 • 19073 Stralendorf • Tel.: +49 (0)3869 7471
www.schweriner-naturheil.de • info@schweriner-naturheil.de





schweriner naturheil®

Moor-Wärmeträger

Medizinprodukt



Erwärmung:

Im Wasserbad: (professionelle Anwendung in der Praxis)
Erwärmen Sie den Wärmeträger in einem geeigneten Wasserbad bei einer Wassertemperatur von ca. 50 °C. Eine Wasserbadtemperatur von 60 °C darf auf keinen Fall überschritten werden. Beachten Sie dabei die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers. Nach ca. 30 Minuten erreichen die Wärmespeicher die gewünschte Temperatur. Wir empfehlen für die Erwärmung das Medizinprodukt: Wasserbad.


Empfohlene Anwendung für eine Langlebigkeit des Produktes. Die Erwärmung im Wasserbad ist umweltfreundlicher und energieeffizienter.

In der Mikrowelle: (nur in Ausnahmefällen im privaten Gebrauch)
Bei max. 900 Watt, max. 3 Minuten erwärmen. Alle zwei Minuten stoppen und Kissen durchkneten, damit sich die Wärme besser verteilt! Bei Bedarf in 30-Sekunden-Schritten verlängern.

Im Backofen: (nur in Ausnahmefällen im privaten Gebrauch)
Bei max. 120°C kurz vorwärmen – dann das Produkt in eine geeignete Wasserschale legen, das Produkt sollte mit Wasser bedeckt sein, das Wasser auf 50 °C erwärmen. Eine Wasserbadtemperatur von 60°C darf auf keinen Fall überschritten werden. Das Produkt ca. 12–15 Minuten erwärmen, bei Bedarf in 2-Minuten-Schritten verlängern. Alle 5 Minuten Wärmekissen herausnehmen und durchkneten, damit sich die Wärme besser verteilt.

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise:

Sicherheitshinweis: Achtung! Lassen Sie den Wärmeträger beim Erhitzen nicht unbeobachtet! Sollte sich das Produkt aufblähen, schalten Sie das Wasserbad aus und überprüfen Sie das Kissen nach dem Abkühlen auf Schäden. Überhitzen des Kissens kann zu Rissen und undichten Stellen führen. Das Kissen nicht mit heißem Metall in Berührung bringen. Vor Gebrauch Handtuch unterlegen!

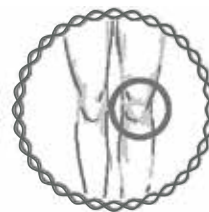

Anwendung in der Kältetherapie – ideal bei Entzündungen:

Kälte dämpft Entzündungen, da die verringerte Körpertemperatur die Aktivität der Entzündungsmediatoren hemmt. Zunächst werden bei der Kältetherapie Gefäßreaktionen ausgelöst und die Muskeln spannen sich an. Das Schmerzempfinden reduziert sich. Bei längerer Anwendung verringert sich die Muskelaktivität, die Muskelspannung wird gesenkt und Verkrampfungen lockern sich.

Anwendungsgebiete:

Entzündungen • Kopfschmerzen • Migräne • Kreislaufbeschwerden • Fieber • Insektenstiche • Prellungen • Knochenbrüche



Kälteanwendung:

Gefrierschrank max. 2 Stunden bei – 10°C.

Im Kühlschrank ist eine dauerhafte Lagerung möglich.

Wichtige Hinweise: (Kontraindikationen)

Beachten Sie, dass die Wärmeträger vorsichtig angewendet werden sollten. Vor der Anwendung bitte die Temperatur vorsichtig mit dem Handrücken testen. Bedenken Sie, dass bereits bei Temperaturen ab 50 Grad Verbrennungen auftreten können. Der Moor-Wärmeträger darf nicht verwendet werden, wenn eine Person Wärme oder Kälte nicht wahrnehmen kann. Verwenden Sie diesen Artikel deswegen nicht bei Kindern unter 3 Jahren, hilflosen oder hitzeunempfindlichen Personen.

