



schweriner naturheil®

Gebrauchsinformation

Stand: VR 1.8 / Juni 2025

Seite 1 von 2

Schweriner Heilmoor

Medizinprodukt



Indikation für die heiße Anwendung:

Subakute und chronische Zustände des rheumatischen Formenkreises/ entzündliche und degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen/ Weichteilrheumatismus/ postakute Zustände nach Traumen am Bewegungsapparat/ funktionelle Durchblutungsstörungen/ Schmerzlinderung bei chronischen Erkrankungen von Magen und Darm sowie der Harn- und Geschlechtsorgane

Heißenwendung:

Auflegen der nicht erwärmten Moorpäckung mit der Vlies-Seite auf die Haut. Soweit nicht anders verordnet liegt die Anwendungstemperatur zwischen 42° und 48° Celsius; entsprechend ist der aufgelegte optionale Thermospeicher (Wärmeträger) auf 55° bis 65° Celsius zu erwärmen. Achten Sie auf die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem erhitzten Wärmeträger! Anwendungsdauer: ca. 20 bis 30 Minuten




Indikation für die kalte Anwendung:

Akute Zustände des rheumatischen Formenkreises/ entzündliche und degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen/ Weichteilrheumatismus/ akute Zustände nach Traumen am Bewegungsapparat/ Unterstützung der Therapie bei akuten Entzündungen des Darms sowie der Harn- und Geschlechtsorgane/ Unterstützung der Therapie bei Venen- und Lymphgefäßentzündungen/ Unterstützung der Therapie zur Fiebersenkung

Kaltanwendung:

Auflegen der nicht gekühlten Moorpäckung mit der Vlies-Seite auf die Haut. Der optionale Thermospeicher (Wärmeträger) wird bei der Kaltanwendung nicht erhitzt, sondern im Kühlschrank auf ca. 3° bis 4° Celsius gekühlt und auf die nicht gekühlte Moorpäckung gelegt. Achten Sie auf die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem gekühlten Wärmeträger! Anwendungsdauer: ca. 10-15 Minuten

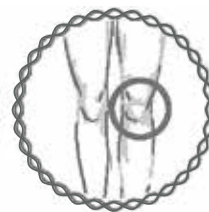

Kontraindikation:

Wärme: Akute Entzündungszustände/ akute Zustände nach Traumen, Blutungen, Ödemen, Durchblutungsstörungen feiner und gröberer Hautgefäße/ Fieberzustände/ Hautareale mit Sensibilitätsstörungen/ großflächige Hautverletzungen und akute Hautkrankheiten/ wärmebedingte Nesselausschläge
Kälte: Durchblutungsstörungen feiner und gröberer Hautgefäße/ kältebedingte Nesselausschläge/ kältebedingte Globulinanhäufung/ großflächige Hautverletzungen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen:

Besonders bei Heißenwendungen muss eine sorgfältige Temperaturkontrolle des Thermospeichers (optionaler Wärmeträger) vor Applikationen erfolgen, da ansonsten Verbrennungsgefahr besteht. Die Gebrauchsanweisung der Wärmeträger sind zu beachten. Der heiße Wärmeträger darf nicht direkt mit dem Körper des Patienten in Kontakt kommen. Packung bitte nicht knicken. Bei Rissbildung können Moorteile ausbrechen und es entstehen freie Stellen ohne Moorpaste. Vor der Applikation ist die Moorpäckung zu kontrollieren, wobei keine "freien Stellen ohne Moor" vorhanden sein dürfen, da sonst Verbrennungsgefahr besteht.

Medikamentöse und sonstige Wechselwirkungen:

Bei Heißenwendung zusammen mit lokal hyperämisierenden Substanzen ist mit Reizwirkungen auf der Haut zu rechnen.

Gebrauchsanweisung gilt für Moorpäckungen der Artikel 0041 und Artikel 0044 und Artikel 0042



PharmaFit GmbH • Moorweg 1 • 19073 Stralendorf • Tel.: +49 (0)3869 7471
www.schweriner-naturheil.de • info@schweriner-naturheil.de



Schweriner Heilmoor

Medizinprodukt

Zweckbestimmung:

Schweriner Heilmoor-Packungen sind nicht-invasive Medizinprodukte der Risikoklasse I gemäß Regel 1 Anhang VIII der MDR (2017/745). Diese Produkte werden zur äußerlichen Anwendung genutzt und dienen der thermischen Behandlung sowie der Unterstützung von Haut- und Muskelfunktionen. Die enthaltenen natürlichen Inhaltsstoffe konkret das Heilmoor ist für seine positiven Wirkungen auf Durchblutung, Entspannung und Hautpflege bekannt. Die Produkte werden als physikalische Therapiehilfen zur Wärme- und Kälteanwendung, zur Linderung von Muskelverspannungen, zur Unterstützung der Hautpflege sowie zur Förderung der Durchblutung eingesetzt. Das Produkt ist zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal sowie zur Anwendung durch informierte Laien im häuslichen Umfeld geeignet.

Handelsname

Schweriner Heilmoor Packung
30 x 40 cm , 380 gr / 33,5 x 58 cm , 800 gr

Inhaltsstoffe

Huminsäure, Calcium, Kalium, Magnesium, Natrium, Zink, Kupfer, Mangan, Chrom, Eisen

Was müssen Sie vor der Anwendung von der Schweriner Heilmoor Packung beachten?

Prüfen Sie, ob eine Überempfindlichkeit oder allergische Reaktion gegen Moor vorliegt.

Welchen Nebenwirkungen sind möglich?

Bei Personen mit hohem allergischen Potential gegen Huminsäure könnte es in seltenen Fällen zu Hautirritationen kommen (Rötung oder Juckreiz). Sollten Nebenwirkungen auftreten, empfehlen wir einen Arzt oder Apotheker zu kontaktieren.

Warnhinweise

Wichtige Warnhinweise zu bestimmten Inhaltsstoffen der Moorpackungen sind nicht bekannt. Die Schweriner Heilmoor Packungen nach dem Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

Hinweis auf Anbruch

Nach Anbruch des Artikels Packung nicht über + 25 Grad lagern, schützen Sie die Packung vor Hitze und Licht. Nach Möglichkeit Packung im Kühlschrank nicht unter 0 Grad, frostfrei, lagern. Die Packung sollte innerhalb von 1 Woche aufgebraucht werden. Vor Hitze und Licht schützen.

Hinweise für Entsorgung:

Für Privatpersonen / Für Privathaushalte:

Das Heilmoor kann im Garten ökologisch entsorgt werden.
Kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Für Kliniken / Krankenhäuser / Physiotherapeutische Praxen:
Abfallentsorgung ohne besondere Anforderung (Nicht infektiöser Klinikmüll)

Zeichenerklärung:



Chargen-
bezeichnung




Medizin-
produkt



Vor Anwendung
Gebrauchsinformation
lesen



Verwendbar
bis

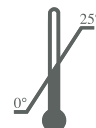

Lager-
bedingungen

Gebrauchsanweisung gilt für Moorpackungen der Artikel 0041 und Artikel 0044 und Artikel 0042