

Loser Schlick

Medizinprodukt

Zweckbestimmung:

Das Produkt ist ein natürliches Peloid und nicht-invasives Medizinprodukt zur äußerlichen Anwendung als Teilkörper- oder Ganzkörperpackung im Rahmen der physikalischen Wärme- und Kältetherapie. Es dient der unterstützenden Behandlung von entzündlichen und degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparates sowie bei Hautkrankheiten. Das Produkt ist zur Anwendung durch medizinisches Fachpersonal sowie zur informierten Selbstanwendung durch Laien bestimmt. Für die äußerliche Anwendung als Peloid auf unverletzte Haut. Zur Anwendung von Ganzkörper- und Teilkörperpackungen in der physikalischen Wärme- und Kältetherapie.

Inhalt:

1000 g


Inhaltsstoffe:

Wasser, Salz, Kalzium, Phosphor, Schwefel, Spurenelemente und Mikroalgen

Reine natürliche aufbereitete Paste, ohne künstliche Zusätze

Beschreibung:

Nordsee-Heilschlick wird direkt aus der einzigartigen Naturlandschaft des Wattenmeeres gewonnen. Aus dem Zusammenspiel des natürlichen Salzgehaltes des Meerwassers, welches ca. zur Hälfte in Nordseeschlick enthalten ist, mit seinen Inhaltsstoffen, bezieht er seine heilsamen Kräfte. Schlick ist entzündungshemmend, regt die Regenerationskräfte der Haut an und wirkt durchblutungsfördernd. Sorgfältig als Paste aufbereitet, wird er als reines Naturprodukt ohne jegliche Zusätze belassen und für wohltuende Wärmebehandlungen, z. B. bei Hauterkrankungen, rheumatischen Erkrankungen des Bewegungsapparates oder Gelenkerkrankungen eingesetzt. Schlick sorgt für die Steigerung Ihres Wohlbefindens. Empfohlen bei Hautkrankheiten – insbesondere bei Neurodermitis und Schuppenflechte.

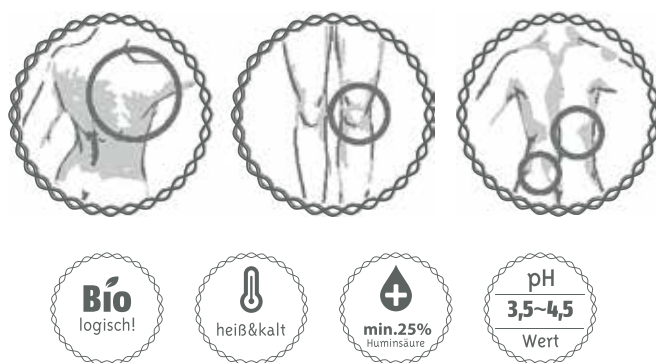

Anwendungsgebiete

Meeresschlick wird sowohl im Bereich Kosmetik als auch in der Physiotherapie angewandt. Hautunreinheiten wie Pickel, Mitesser, Akne sowie Rötungen und Entzündungen der Haut werden aufgrund der reinigenden Wirkung des Schlicks entgegengewirkt. Die Haut wird porentief gereinigt, die Durchblutung wird angeregt und der natürliche Regenerationsprozess der Haut zudem gefördert. Verhornungen und Talg können sich durch regelmäßige Anwendungen lösen, wodurch die Neubildung von Zellen angeregt wird. Er fördert die Durchblutung, regt den Stoffwechsel an, wirkt entzündungshemmend und entschlackend. Dadurch wird etwa das Hautbild verbessert und das Bindegewebe gestärkt.

Anzuwenden zur Unterstützenden physikalischen Therapie.

- Hauterkrankungen
- Rheumatischen Erkrankungen des Bewegungsapparates
- Gelenkerkrankungen
- Muskellaffektionen
- Gicht – Hexenschuss – Ischias

Anwendung:

Entnehmen Sie die Paste mit einem Spatel oder Löffel. Streichen Sie, je nach Bedarf, die Schlickpaste gleichmäßig auf die Haut.

Loser Schlick

Medizinprodukt

Vor der Anwendung prüfen Sie, ob eine Überempfindlichkeit oder allergische Reaktion gegen die Inhaltsstoffe zum Beispiel gegen Mineralsalze vom reinen Schlick besteht. Die Schlickpaste darf nicht in direkten Kontakt mit offenen Wunden gelangen.

Wundheilung: Im Falle der unterstützenden physikalischen Therapie bei der Wundheilung muss die Wunde zuvor gereinigt werden. Geeignete Wundauflagen sind, z.B. Hydrokolloidverbände, haftende und nicht-haftende Schaumstoffverbände, Folienverbände und Duschpflaster. Das Reinigen und Versorgen der Wunde sollte möglichst durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Beim Aufstreichen der Paste sollte die Wunde samt Wundauflage ausgelassen werden. Sollten Nebenwirkungen vermutet werden, wie zum Beispiel, Hautirritationen (Rötungen, Juckreiz) empfehlen wir vor der Anwendung Ihren Arzt oder Apotheker zu kontaktieren.

Anwendung als Fußlinge

Füße dick mit der Paste einstreichen, den Fuß mit einem Leintuch oder hauchdünne Folie (Frischhaltefolie) einwickeln. Wenn vorhanden, große dicke Wollstrumpfe über den Fuß ziehen.

Warnhinweise

Wichtige Warnhinweise zu bestimmten Inhaltsstoffen der Schlickpaste sind nicht bekannt.

Die Schlickpaste nach dem Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

Hinweis auf Anbruch

Nach Anbruch des Artikels sollte der Behälter sorgfältig verschlossen nicht über + 25 Grad wenn möglich im Kühlschrank nicht unter 0 Grad, frostfrei, gelagert werden. Der Inhalt des angebrochenen Behälters sollte innerhalb 1 Woche aufgebraucht werden.

Vor Hitze und Licht schützen.

Hinweise für Entsorgung:

Für Privatpersonen / Für Privathaushalte:

Kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Für Kliniken / Krankenhäuser / Physiotherapeutische Praxen:
Abfallentsorgung ohne besondere Anforderung
(Nicht infektiöser Klinikmüll)

Zeichenerklärung:



Chargen-
bezeichnung




Medizin-
produkt



Vor Anwendung
Gebrauchsinformation
lesen



Verwendbar
bis

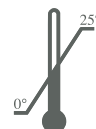

Lager-
bedingungen