



schwerinernaturheil®

Stand 2025

Meeres-Heilschlick

Medizinprodukt



Indikation für die heiße Anwendung:

Subakute und chronische Zustände des rheumatischen Formenkreises/ entzündliche und degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen/ Weichteilrheumatismus/ postakute Zustände nach Traumen am Bewegungsapparat/ funktionelle Durchblutungsstörungen/ entzündungshemmend, durchblutungsfördernd/ regt die Regenerationskräfte der Haut an.

Heiße Anwendung:

Auflegen der nicht erwärmten Schlickpackung mit der Vlies-Seite auf die Haut. Soweit nicht anders verordnet liegt die Anwendungstemperatur bei zwischen 42° und 48° Celsius; entsprechend ist der aufgelegte optionale Thermo-speicher (Wärmeträger) auf 55° bis 60° Celsius zu erwärmen. Achten Sie auf die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem erhitzten Wärmeträger! Anwendungsdauer: ca. 20 bis 30 Minuten




Indikation für die kalte Anwendung:

Akute Zustände des rheumatischen Formenkreises/ entzündliche und degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen/ Weichteilrheumatismus/ akute Zustände nach Traumen am Bewegungsapparat/ Unterstützung der Therapie bei Venen- und Lymphgefäßentzündungen/ Unterstützung der Therapie zur Fiebersenkung/ entzündungshemmend, durchblutungsfördernd/ regt die Regenerationskräfte der Haut an.

Kaltanwendung:

Auflegen der nicht gekühlten Moorpackung mit der Vlies-Seite auf die Haut. Der optionale Thermo-speicher (Wärmeträger) wird bei der Kaltanwendung nicht erhitzt, sondern im Kühlschrank auf ca.

3° bis 4° Celsius gekühlt und auf die nicht gekühlte Schlickpackung gelegt. Achten Sie auf die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem gekühlten Wärmeträger! Anwendungsdauer : ca. 10-15 Minuten

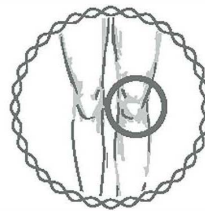

Kontraindikation:


Wärme: Akute Entzündungszustände/ akute Zustände nach Traumen, Blutungen, Ödemen, Durchblutungsstörungen feiner und gröberer Hautgefäße/ Fieberzustände/ Hautareale mit Sensibilitätsstörungen/ großflächige Hautverletzungen und akute Hautkrankheiten/ wärmebedingte Nesselausschläge
Kälte: Durchblutungsstörungen feiner und gröberer Hautgefäße/ kältebedingte Nesselausschläge/ kältebedingte Globulinanhäufung/ großflächige Hautverletzungen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen:

Besonders bei HeißeAnwendungen muss eine sorgfältige Temperaturkontrolle des Thermo-speichers (optionaler Wärmeträger) vor Applikationen erfolgen, da ansonsten Verbrennungsgefahr besteht. Die Gebrauchsanweisung der Wärmeträger sind zu beachten. Der heiße Wärmeträger darf nicht direkt mit dem Körper des Patienten in Kontakt kommen. Packung bitte nicht knicken. Bei Rissbildung können Moorteile ausbrechen und es entstehen freie Stellen ohne Moorpaste. Vor der Applikation ist die Moorpackung zu kontrollieren, wobei keine "freien Stellen ohne Moor" vorhanden sein dürfen, da sonst Verbrennungsgefahr besteht.

Medikamentöse und sonstige Wechselwirkungen:

Bei HeißeAnwendung zusammen mit lokal hyperämisierenden Substanzen ist mit Reizwirkungen auf der Haut zu rechnen.

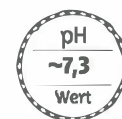

PharmaFit GmbH
Moorweg 1 • 19073 Stralendorf
Telefon +49 (0) 38 69 / 74 71
www.schwerinernaturheil.de



Medizinprodukt nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden. Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Angebrochene Packungen müssen sorgfältig verschlossen und innerhalb einer Woche verbraucht werden.
Beim Lagern vor Sonneneinstrahlung, Wärme und Frost schützen.

Versionsnummer 1.0

Gerbauchsinformation
Stand:VR1.8, Juni 2025 / Seite 1 von 2

Gebrauchsinformation

Meeres Schlickpackungen sind nicht-invasive Medizinprodukte der Risikoklasse I gemäß Regel 1 Anhang VIII der MDR (2017/745). Diese Produkte werden zur äußerlichen Anwendung genutzt und dienen der thermischen Behandlung sowie der Unterstützung von Haut- und Muskelfunktionen. Die enthaltenen natürlichen Inhaltsstoffe vom Schlick sind für ihre positiven Wirkungen auf Durchblutung, Entspannung und Hautpflege bekannt.

Die Produkte werden als physikalische Therapiehilfen zur Wärme- und Kälteanwendung, zur Linderung von Muskelverspannungen, zur Unterstützung der Hautpflege sowie zur Förderung der Durchblutung eingesetzt.“

Handelsname

Meeres Schlickpackung 30 x 40 cm , 500 gr

Inhaltsstoffe : Chlorid, Magnesium, Calcium, Kalium, Phosphor, Schwefel, Algenextrakte, Meersalz und Spurenelemente.

Was müssen Sie vor der Anwendung von der Meeres Schlickpackung beachten ?

Prüfen Sie , ob eine Überempfindlichkeit oder allergische Reaktion gegen Schlick vorliegt.

Welchen Nebenwirkungen sind möglich?

Bei Personen mit hohen allergischen Potential könnte es in seltenen Fällen zu Hautirritationen kommen (Rötung oder Juckreiz) . Sollten Nebenwirkung auftreten , empfehlen wir einen Arzt oder Apotheker zu kontaktieren .

Warnhinweise

Warnhinweise zu bestimmten Inhaltsstoffen der Meeres Schlickpackungen sind nicht bekannt. Die Meeres Schlickpackungen nach dem Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

Hinweis auf Anbruch

Nach Anbruch des Artikels Packung nicht über + 25 Grad lagern, schützen Sie die Packung vor Hitze und Licht. Nach Möglichkeit Packung im Kühlschrank nicht unter 0 Grad , frostfrei, lagern. Die Packung sollte innerhalb von 1 Woche aufgebraucht werden. Vor Hitze und Licht schützen.

Hinweise für Entsorgung:

Für Privatpersonen / Für Privathaushalte:

Das Heilmoor kann im Garten ökologisch entsorgt werden.

Kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Für Kliniken / Krankenhäuser / Physiotherapeutische Praxen:

Abfallentsorgung ohne besondere Anforderung (Nicht infektiöser Klinikmüll)


Zeichenerklärung




Verwendbar bis



Chargenbezeichnung

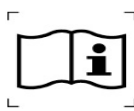

Vor Anwendung Gebrauchs-
information lesen

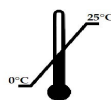

Lagerbedingungen



Medizinprodukt

